


APPLICAZIONE E RIMOZIONE DI UNA LENTE SCLERALE METODO DELLE TRE DITA

Mantenere sempre pulite le mani quando si manipolano lenti a contatto sclerali. Può essere utile munirsi di uno specchio con sotto un panno pulito. Iniziare sempre con lo stesso occhio in modo da evitare di invertire le lenti.

APPLICARE LE LENTI



Sciagquare la lente con la soluzione salina senza conservanti.

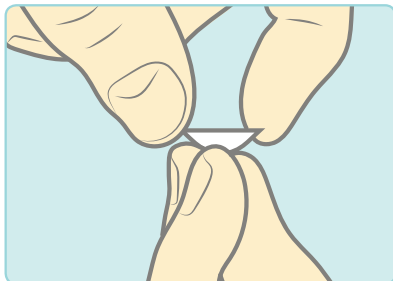


Posizionare la lente tra le dita centrandola tra il pollice, l'indice e il medio.




Riempire la lente con salina senza conservanti, fino a ottenere una forma convessa. Non lasciare che fuoriesca.



Chinarsi in avanti e guardare dritto verso il basso. Mentre si tengono le palpebre ben aperte, applicare la lente al centro dell'occhio.

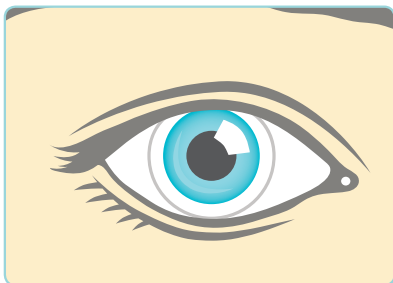


Ammiccare. Asciugare la soluzione in eccesso. Assicurarsi che la lente sia centrata e confortevole.

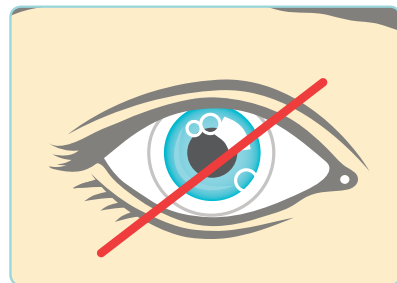

Bolle d'aria possono causare discomfort, visione scarsa e talvolta abbagliamento. Se si presentano bolle d'aria, riapplicare la lente.

RIMUOVERE LE LENTI


(E' POSSIBILE RIMUOVERE LE LENTI ANCHE TRAMITE L'UTILIZZO DI UNA VENTOSA - VEDI RETRO)

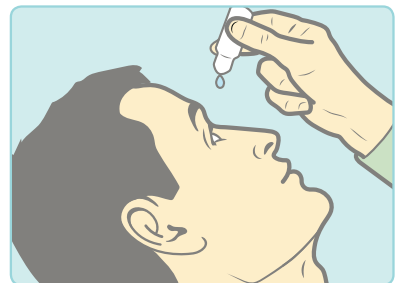

Inserire 1 o 2 gocce di salina senza conservanti per aiutare il dislocamento della lente.



Abbassare la palpebra inferiore e poi sollevarla in modo da posizionarsi sotto il bordo inferiore della lente. Premere verso l'alto per distaccare la lente.

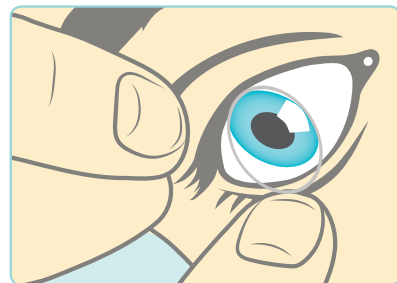

Mentre si è inclinati di fronte a un panno, sollevare il bordo della lente con l'altra mano e rimuovere la lente.

- Attenersi al regime d'uso delle lenti a contatto indicato dallo specialista
- Utilizzare sempre soluzione nuova
- Non utilizzare acqua di rubinetto per riempire o risciacquare le lenti a contatto
- Sostituire il contenitore delle lenti a contatto come raccomandato dal professionista della visione

Per ulteriori informazioni visitare fit-boston.eu

© 2018 Bausch & Lomb Incorporated. SCFL0030.USA.17




APPLICAZIONE E RIMOZIONE DI UNA LENTE SCLERALE METODO CON LA VENTOSA

Mantenere sempre pulite le mani quando si manipolano lenti a contatto sclerali. Può essere utile uno specchio con sotto un panno pulito. Iniziare sempre con lo stesso occhio in modo da evitare di invertire le lenti.

APPLICARE LE LENTI




Sciagquare la lente con la soluzione salina senza conservanti.

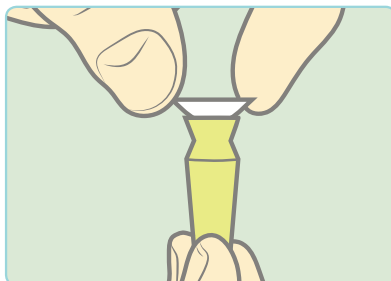


Posizionare la lente al centro della ventosa.




Riempire la lente con salina senza conservanti, fino a ottenere una forma convessa. Non lasciare che fuoriesca.

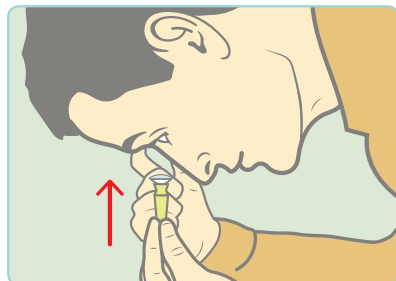

Chinarsi in avanti e guardare dritto verso il basso. Mentre si tengono le palpebre ben aperte, applicare la lente al centro dell'occhio.

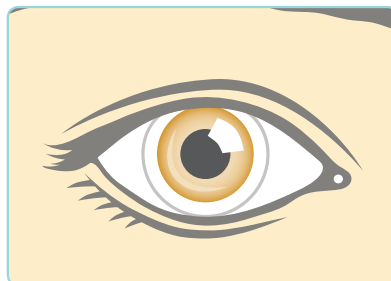


Ammiccare. Asciugare la soluzione in eccesso. Assicurarsi che la lente sia centrata e confortevole.

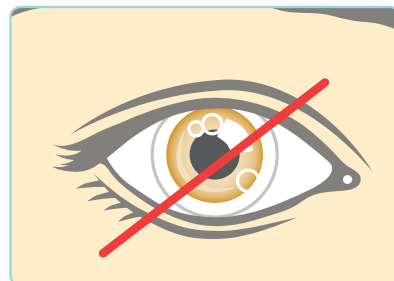

Bolle d'aria possono causare discomfort, visione scarsa e talvolta abbagliamento. Se si presentano bolle d'aria, riapplicare la lente.


RIMUOVERE LE LENTI

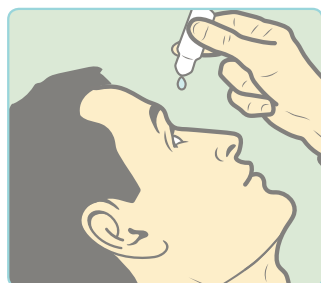


Inserire 1 o 2 gocce di salina senza conservanti per aiutare il dislocamento della lente.



Inumidire la ventosa con 1 o 2 gocce di salina senza conservanti.

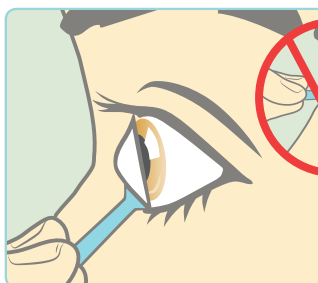

Far aderire delicatamente la ventosa al bordo (NON al centro) della lente.

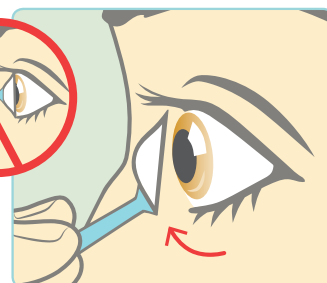

Inclinare delicatamente la lente verso l'alto e verso l'esterno e rimuoverla delicatamente dall'occhio.

- Attenersi al regime d'uso delle lenti a contatto indicato dallo specialista
- Utilizzare sempre soluzione nuova
- Non utilizzare acqua di rubinetto per riempire o risciacquare le lenti a contatto
- Sostituire il contenitore delle lenti a contatto come raccomandato dal professionista della visione

Per ulteriori informazioni visitare fit-boston.eu

© 2018 Bausch & Lomb Incorporated. SCFL0030.USA.17

