


COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL LENTE ESCLERAL. MÉTODO CON TRES DEDOS

Siempre lave bien sus manos para manipular los lentes de contacto esclerales. Un espejo y un paño limpio por debajo del área puede ser de utilidad. Siempre comience con el mismo ojo para evitar confundir los lentes.


COLOCACIÓN DE LOS LENTES



Enjuague el lente con la solución salina sin conservantes la solución salina sin conservantes.

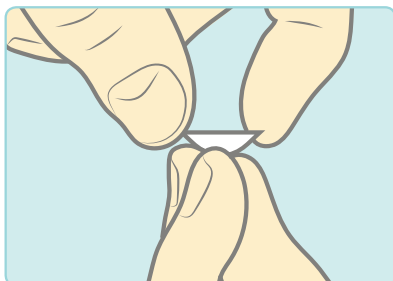


Centre el lente sobre los dedos pulgar, índice y mayor.

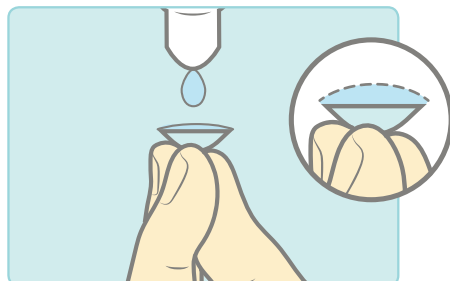


Llene el lente con la solución salina sin conservantes, creando una forma convexa. Evite que se desborde.



Inclínese hacia adelante y mire directamente hacia abajo. Manteniendo los párpados bien abiertos, ubique el lente en el centro del ojo.

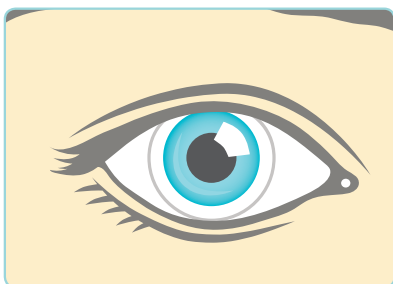


Parpadee. Seque el exceso de solución. Asegúrese de que el lente esté centrado y cómodo.

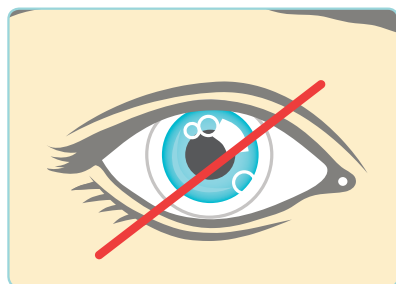

Las burbujas de aire pueden ocasionar incomodidad, mala visión y reflejos poco comunes. Si hay burbujas de aire, aplique nuevamente.

EXTRACCIÓN DE LOS LENTES


(TAMBIÉN PUEDEN SER EXTRAÍDOS CON VENTOSA – VÉASE EL REVERSO)

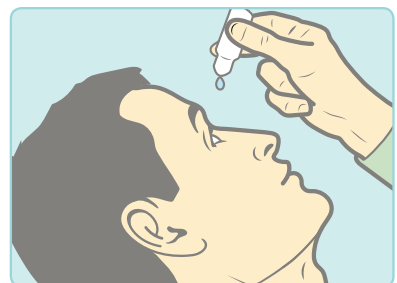

Aplique 1 - 2 gotas de la solución salina sin conservantes para aflojar el lente.



Lleve el párpado inferior hacia abajo y luego hacia arriba para que quede por debajo del borde del lente. Presione hacia arriba para aflojar el lente.

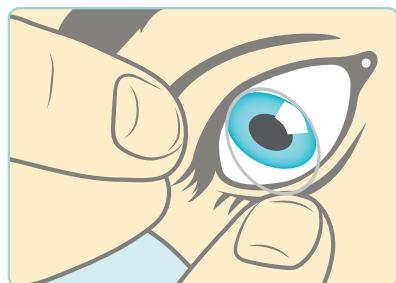

Inclinándose sobre un paño, levante el borde del lente con su otra mano y extráigalo.

- Siga el régimen recomendado por el médico para el cuidado de los lentes. La solución salina sin conservantes es una solución para enjuague y colocación de los lentes y su propósito no es utilizarla para guardarlos.
- Siempre utilice solución nueva.
- No use agua del grifo para enjuagar los lentes.
- Reemplace el estuche de los lentes según las recomendaciones del profesional de la visión.



Para obtener más información sobre otros lentes y productos especiales de la visión visite bostonlentesgp.com

APLICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS LENTES ESCLERALES


MÉTODO CON VENTOSA

Siempre lave bien sus manos cuando manipule lentes de contacto esclerales. Un espejo y un paño limpio por debajo del área puede ser de utilidad. Siempre comience con el mismo ojo para evitar confundir los lentes.

COLOCACIÓN DE LOS LENTES




Enjuague el lente con la solución salina sin conservantes la solución salina sin conservantes.

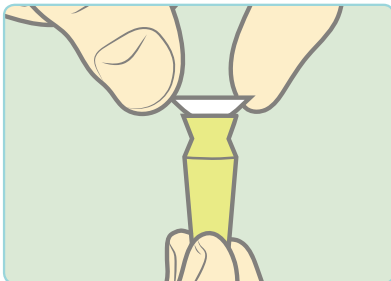


Ubique el lente en el centro de la ventosa.




Llene el lente con la solución salina sin conservantes, creando una forma convexa. Evite que se desborde.

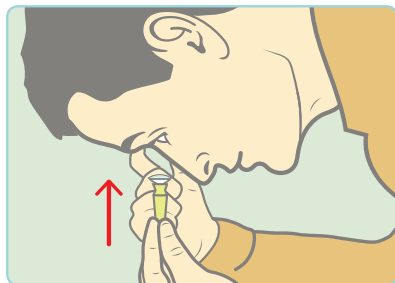

Inclínese hacia adelante y mire directamente hacia abajo. Manteniendo los párpados bien abiertos, ubique el lente en el centro del ojo.

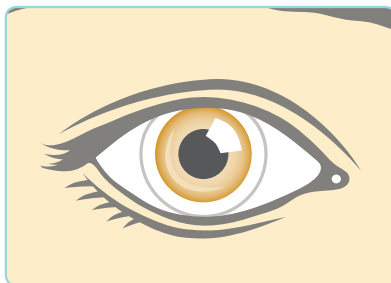


Papadee. Seque el exceso de solución. Asegúrese de que el lente esté centrado y cómodo.

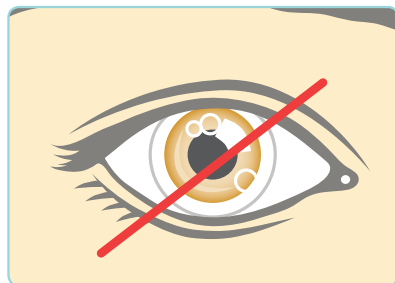


Las burbujas de aire pueden ocasionar incomodidad, mala visión y reflejos poco comunes. Si encuentra alguna burbuja de aire, aplique nuevamente.


EXTRACCIÓN DE LOS LENTES

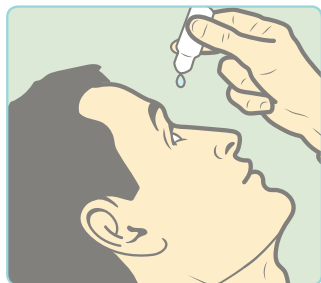


Aplique 1 - 2 gotas de la solución salina sin conservantes para aflojar el lente.

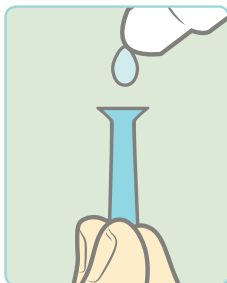

Humedezca la ventosa con una o dos gotas de la solución salina sin conservantes.

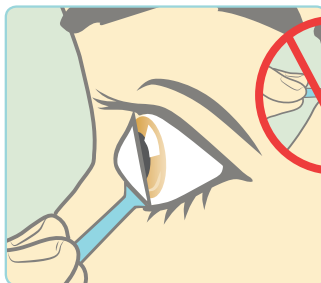

Con suavidad, aplique la ventosa en el borde (NO el centro) del lente.

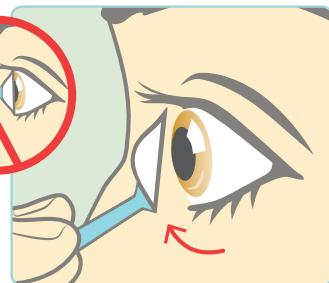

Con cuidado, incline el lente hacia arriba y afuera y extráigalo suavemente del ojo.

- Siga el régimen recomendado por el médico para el cuidado de los lentes. La solución salina sin conservantes es una solución para enjuague y colocación de los lentes y su propósito no es utilizarla para guardarlos.
- Siempre utilice solución nueva.
- No use agua del grifo para enjuagar los lentes.
- Reemplace el estuche de los lentes según las recomendaciones del profesional de la visión.



Para obtener más información sobre otros lentes y productos especiales de la visión visite bostonlentesgp.com